

RESULTADOS: ANTES E DEPOIS

Redefinindo a beleza



icoone[®]

Veja e sinta a diferença das microestimulações icoone®

icoone® é o inovador equipamento natural e não-invasivo para tratamentos de rosto e corpo que oferece resultados incríveis, eficazes e rápidos.

Com base em diversos estudos científicos, icoone® possui a mais inovadora tecnologia patenteada do mundo para tratamentos de pele chamada Roboderm®.

Roboderm® representa um novo conceito de tecnologia para o tratamento da pele que atua de forma diferente de qualquer outra tecnologia ou equipamento existente atualmente no Mercado, graças às suas Multi Micro Alveolar Estimulações (M.M.A.S.).

icoone® induz até 21.600 microestimulações por minuto na pele com os seus movimentos e permite oferecer a melhor e mais eficiente ação em todos os tipos de pele.

Rosto, olhos, pescoço, braços, corpo: não há limites de aplicação para tratar a sua beleza e bem-estar.

icoone® é a solução perfeita e 100% natural para todos os tipos de pele e não tem efeitos secundários!




Tratamentos personalizados para resultados imbatíveis

A experiência **icoone®** é **totalmente personalizável** e pode ser feita à medida para responder aos objetivos específicos e adaptar-se às necessidades e preferências individuais.

TRATAMENTO: Um tratamento completo é composto por um programa base de corpo total de 20 Minutos e que continua durante 10 Minutos de cada programa, focando-se nas áreas específicas dependendo do objetivo.

DURAÇÃO: Graças à sua tecnologia não invasiva e delicada, **icoone®** respeita a pele e não tem um limite de tempo de utilização. Um ciclo envolve geralmente entre 2 ou 3 sessões por semana, mas pode ser **mais concentrado, até mesmo todos os dias, para resultados mais rápidos.**

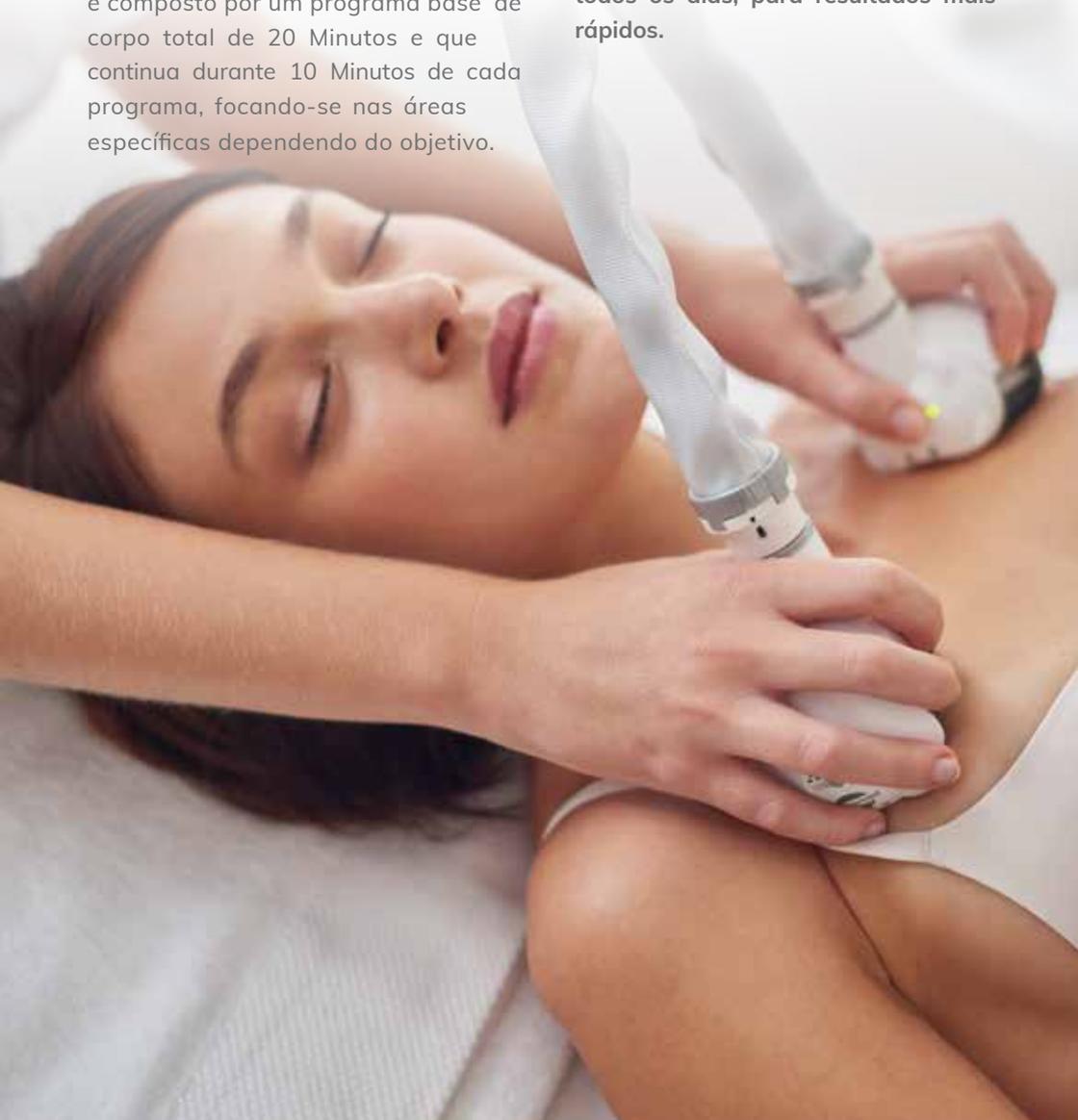

SUMMARY

RESULTADOS DE CORPO ESTÉTICOS	5
CASO 1 - CELLULITE.....	6
CASO 2 - CELLULITE AND REMODELING.....	7
CASO 3 - CELLULITE.....	8
CASO 4 - ESTRIAS.....	9
CASO 5 - ESTRIAS.....	10
CASO 6 - REMODELAMENTO DA CINTURA	11
CASO 7 - BREMODELAMENTO DO ABDÓMEN	12
CASO 8 - REMODELAMENTO DA CINTURA	13
CASO 9 - REMODELAMENTO DA SILHUETA	14
CASO 10 - BREMODELAMENTO DO ABDÓMEN	15
CASO 11 - REFIRMAR ABDÓMEN	16
CASO 12 - REFIRMAR ABDÓMEN.....	17
CASO 13 - REFIRMAR ABDÓMEN	18
RESULTADOS DE ROSTO ESTÉTICOS.....	19
CASO 14 - QUALIDADE DA PELE	20
CASO 15 - ANTIENVELHECIMENTO	21
CASO 16 - REJUVENESCIMENTO DA PELE	22
CASO 17 - REGENERAÇÃO DO ROSTO	23
CASO 18 - REJUVENESCIMENTO DA PELE	24
CASO 19 - REFIRMAR A PELE	26
CASO 20 - FACE CONTOURING.....	27
RESULTADOS MÉDICOS	28
CASO 1 - PÓS-CESARIANA.....	29
CASO 2 - PÓS-CESARIANA	30
CASO 3- PÓS-CESARIANA.....	31
CASO 4 - RECUPERAÇÃO DE LIPOASPIRAÇÃO	32
CASO 5 - REDUÇÃO DA FIBROSE	34
CASO 6 - RECUPERAÇÃO DE MAMOPLASTIA	35
CASO 7 - REABILITAÇÃO DE ARTROPLASTIA	36
CASO 8 - RECUPERAÇÃO DE RINOPLASTIA	38
CASO 9 - RECUPERAÇÃO DE BLEFAROPLASTIA	40
CASO 10 - RECUPERAÇÃO DE BLEFAROPLASTIA...	41

RESULTADOS
DE CORPO
ESTÉTICOS



ANTES



DEPOIS DE 10 SESSÕES

♀ Mulher
🕒 20 Anos



OBJETIVO

Melhorar o aspeto da celulite e o tónus e compactidade da pele.

PROGRAMAS



CELLDRAIN



SILK



MODELPLUS



LASER/LED



PRESCRIÇÃO DO TRATAMENTO

- Número de sessões: 10
- Duração da sessão: 40 Minutos
- Frequência: 2x por semana

RESULTADOS DEPOIS DE 10 SESSÕES

- Melhoria da circulação
- Redução de volume
- Textura mais lisa dos tecidos

até **21.600**
MICROESTIMULAÇÕES
por minuto



ANTES



DEPOIS DE 10 SESSÕES

♀ Mulher
🕒 41 Anos



OBJETIVO

Reduzir o aspeto da celulite, melhorar a silhueta.

PROGRAMAS



CELLDRAIN



SILK



SILHOUETTE



LASER/LED

PRESCRIÇÃO DO TRATAMENTO

- Número de sessões: 10
- Duração da sessão: 40 Minutos
- Frequência: 2x por semana

RESULTADOS DEPOIS DE 10 SESSÕES

- Redução visível de volume nas ancas e pernas
- Melhoria do aspeto da celulite



ANTES

DEPOIS DE 10 SESSÕES

♀ Mulher
🕒 35 Anos

OBJETIVO

Remodelar a silhueta e efeito de lifting nas nádegas.

PRESCRIÇÃO DO TRATAMENTO

- Número de sessões: 10
- Duração da sessão: 50 Minutos
- Frequência: 2x por semana

PROGRAMAS



CELLFAT



SILHOUETTE



MODELPLUS



FATZONE

RESULTADOS DEPOIS DE 10 SESSÕES

- Melhoria do aspeto da pele e remodelamento das nádegas



ANTES

DEPOIS DE 4 SESSÕES

- ♀ Mulher
- 🕒 13 Anos



OBJETIVO

Melhoria do aspeto das estrias vermelhas.

PRESCRIÇÃO DO TRATAMENTO

- Número de sessões: 4
- Duração da sessão: 20 Minutos
- Frequência: 1x por semana

PROGRAMAS



ELASTO



BIOYOUNG



RESULTADOS DEPOIS DE 4 SESSÕES

- Melhoria do aspeto da pele
- Aumento da elasticidade e compactidade da pele



ANTES



DEPOIS DE 10 SESSÕES

♀ Mulher
🕒 27 Anos

OBJETIVO

Melhorar o aspeto das estrias depois da gravidez.

PRESCRIÇÃO DO TRATAMENTO

- Número de sessões: 10
- Duração da sessão: 30 Minutos
- Frequência: 2x por semana

PROGRAMAS




ELASTO



BIOYOUNG

RESULTADOS DEPOIS DE 10 SESSÕES

- Melhoria do aspeto da pele
- Pele mais lisa

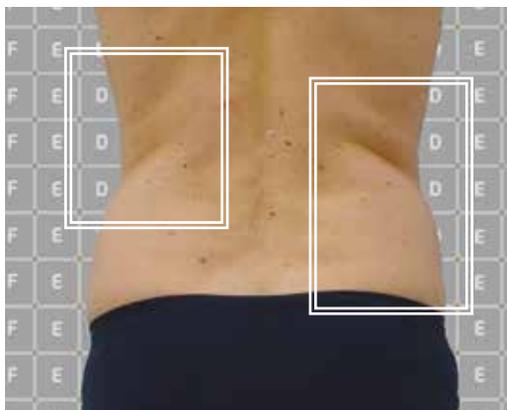

ANTES



DEPOIS DE 5 SESSÕES

♂ Homem

🕒 39 Anos

OBJETIVO

Remodelar a cintura e reduzir os depósitos de gordura localizada.

PRESCRIÇÃO DO TRATAMENTO

- Número de sessões: 5
- Duração da sessão: 40 Minutos
- Frequência: Todos os dias

PROGRAMAS



CELLFAT



MEN-ZONE



FATZONE



LASER/LED

RESULTADOS DEPOIS DE 5 SESSÕES

- Melhoria da qualidade da pele
- -2cm



ANTES



DEPOIS DE 5 SESSÕES

♂ Homem
🕒 40 Anos



OBJETIVO

Remodelar o abdômen e a área abdominal.

PROGRAMAS



CELLFAT



MEN-ZONE



FATZONE



LASER/LED

PRESCRIÇÃO DO TRATAMENTO

- Número de sessões: 5
- Duração da sessão: 40 Minutos
- Frequência: Todos os dias

RESULTADOS DEPOIS DE 10 SESSÕES

- Melhoria da silhueta
- - 4cm



ANTES



DEPOIS DE 10 SESSÕES

♀ Mulher
🕒 35 Anos



OBJETIVO

Reduzir o volume da cintura e melhorar a silhueta.

PROGRAMAS



CELLFAT



ABDOTON



MENZONE



LASER/LED

PRESCRIÇÃO DO TRATAMENTO



BEST
RESULT


- Número de sessões: 10
- Duração da sessão: 40 Minutos
- Frequência: 3x por semana

RESULTADOS DEPOIS DE 10 SESSÕES

- Melhoria da qualidade da pele
- Harmonização da silhueta



ANTES

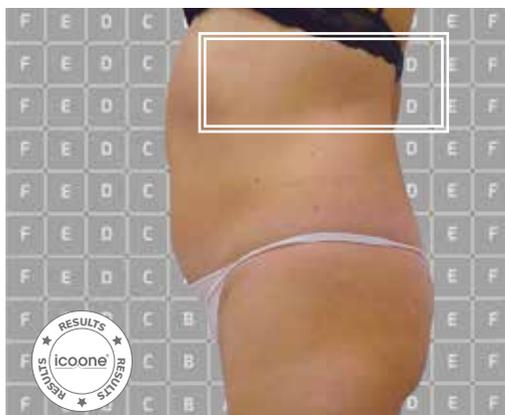

DEPOIS DE 5 SESSÕES

♀ Mulher
🕒 55 Anos



OBJETIVO

Remodelar a silhueta, melhorar a elasticidade da pele.

PROGRAMAS



CELLFAT



FLOWING



SILHOUETTE



MEN-ZONE



LASER/LED



PRESCRIÇÃO DO TRATAMENTO

- Número de sessões: 5
- Duração da sessão: 40 Minutos
- Frequência: 3x por semana

RESULTADOS DEPOIS DE 5 SESSÕES

- Harmonização da silhueta
- -3cm



ANTES



DEPOIS DE 6 SESSÕES

♀ Mulher
🕒 38 Anos



OBJETIVO

Reduzir a gordura no abdômen e na área do habitualmente chamado "pneu".

PROGRAMAS



CELLFAT



SILHOUETTE



FATZONE



LASER/LED



PRESCRIÇÃO DO TRATAMENTO



FASTEST RESULT

- Número de sessões: 6
- Duração da sessão: 40 Minutos
- Frequência: 2x por semana

RESULTADOS DEPOIS DE 6 SESSÕES

- Melhoria da qualidade da pele
- Harmonização da silhueta



ANTES



DEPOIS DE 5 SESSÕES

♀ Mulher
🕒 40 Anos



OBJETIVO

Refirmar a pele abdominal,
melhorar a qualidade da pele.

PROGRAMAS



ELASTO



BIOYOUNG



ABDOTON



RESULTADOS DEPOIS DE 5 SESSÕES

- Melhoria do aspeto da pele
- Aumento da elasticidade e compactidade da pele

até **21.600**
MICROESTIMULAÇÕES
por minuto



ANTES



DEPOIS DE 4 SESSÕES

♀ Mulher
🕒 53 Anos



PRESCRIÇÃO DO TRATAMENTO

- Número de sessões: 4
- Duração da sessão: 50 Minutos
- Frequência: 2x por semana

OBJETIVO

Melhorar a qualidade da pele e refirmar os tecidos.

PROGRAMAS



ELASTO



SILHOUETTE



BIOYOUNG



ABDOTON



RESULTADOS DEPOIS DE 4 SESSÕES

- Pele visivelmente mais firme



ANTES



DEPOIS DE 10 SESSÕES

♀ Mulher
🕒 43 Anos

OBJETIVO

Refirmar e tonificar o abdômen depois de duas gravidezes e dietas radicais.

PRESCRIÇÃO DO TRATAMENTO

- Número de sessões: 10
- Duração da sessão: 50 Minutos
- Frequência: 1x por semana

PROGRAMAS



ELASTO



SILHOUETTE



ABDOTON



BIOYOUNG

RESULTADOS DEPOIS DE 10 SESSÕES

- Melhoria do tônus e compactidade da pele depois de duas gravidezes e dietas

RESULTADOS
DE ROSTO
ESTÉTICOS



AMPLIAÇÃO X10

ANTES



AMPLIAÇÃO X10

DEPOIS DE 5 SESSÕES

♀ Mulher
🕒 25 Anos



PRESCRIÇÃO DO TRATAMENTO

- Número de sessões: 5
- Duração da sessão: 30 Minutos
- Frequência: 2x por semana



OBJETIVO

Melhorar a qualidade da pele, oxigenar a pele e reduzir os efeitos das cicatrizes causadas pela acne.

PROGRAMAS



NECK FACE
DRAIN



NECK FACE
TWO



RESULTADOS DEPOIS DE 5 SESSÕES

- Pele mais lisa
- Hidratação da pele
- Melhoria do aspeto das rugas



ANTES



DEPOIS DE 10 SESSÕES

♀ Mulher
🕒 75 Anos



PRESCRIÇÃO DO TRATAMENTO

- Número de sessões: 10
- Duração da sessão: 30 Minutos
- Frequência: 3x por semana



OBJETIVO

Melhoria do tónus e compactidade da pele para um efeito antienvelhecimento.

PROGRAMAS



NECK FACE TWO



SMOOTHFACE



EYELIGHT



RESULTADOS DEPOIS DE 10 SESSÕES

- Rejuvenescimento visível da pele e melhoria dos contornos faciais.



ANTES



DEPOIS DE 6 SESSÕES

♀ Mulher
🕒 57 Anos



OBJETIVO

Melhorar a qualidade da pele,
reduzir o aspeto das rugas.

PRESCRIÇÃO DO TRATAMENTO

- Número de sessões: 6
- Duração da sessão: 30 Minutos
- Frequência: 3x por semana

PROGRAMAS



NECK FACE
DRAIN



NECK FACE
TWO



RESULTADOS DEPOIS DE 6 SESSÕES

- Melhoria da compactidade e elasticidade da pele



ANTES



DEPOIS DE 2 SESSÕES

♀ Mulher
🕒 68 Anos



PRESCRIÇÃO DO TRATAMENTO

- Número de sessões: 2
- Duração da sessão: 30 Minutos
- Frequência: 2 times a week

OBJETIVO

Refirmar e tonificar a pele, reduzir as rugas profundas e marcadas no rosto, pescoço e decote.

PROGRAMAS



NECK FACE TWO



SMOOTHFACE



EYELIGHT

RESULTADOS DEPOIS DE 2 SESSÕES

- Melhoria do aspeto da pele
- Pele mais lisa e melhoria da compactidade da pele



ANTES



DEPOIS DE 4 SESSÕES

♀ Mulher
🕒 65 Anos



PRESCRIÇÃO DO TRATAMENTO

- Número de sessões: 4
- Duração da sessão: 40 Minutos
- Frequência: 3x por semana

OBJETIVO

Rejuvenescer a pele e melhorar o aspeto das rugas.

PROGRAMAS



NECK FACE
DRAIN



SMOOTHFACE



EYELIGHT



NECK FACE
TWO

RESULTADOS DEPOIS DE 4 SESSÕES

- Pele mais lisa
- Hidratação da pele
- Melhoria do aspeto das rugas



ANTES



DEPOIS DE 4 SESSÕES



OBJETIVO

Rejuvenescer a pele e melhorar o aspeto das rugas.

PROGRAMAS



NECK FACE
DRAIN



SMOOTHFACE



EYELIGHT



NECK FACE
TWO



PRESCRIÇÃO DO TRATAMENTO

- Número de sessões: 4
- Duração da sessão: 40 Minutos
- Frequência: 3x por semana



RESULTADOS DEPOIS DE 4 SESSÕES

- Melhorar o aspeto das rugas e dos lábios



ANTES



DEPOIS DE 4 SESSÕES

♀ Mulher
🕒 67 Anos



OBJETIVO

Regenerar os tecidos do pescoço e rosto para um efeito antienvelhecimento.



FASTEST
RESULT

PRESCRIÇÃO DO TRATAMENTO

- Número de sessões: 4
- Duração da sessão: 30 Minutos
- Frequência: 1x por semana

PROGRAMAS




NECK FACE
TWO



RESULTADOS DEPOIS DE 4 SESSÕES

- Redução das rugas
- Melhoria dos contornos faciais

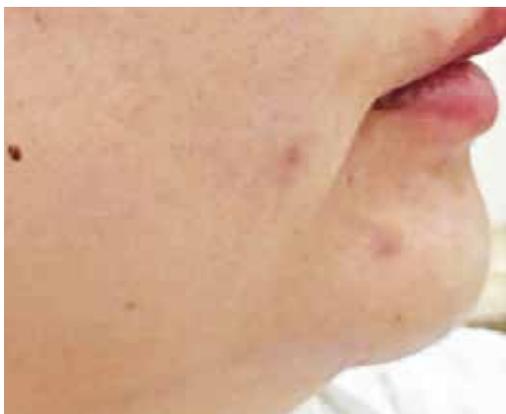

ANTES



DEPOIS DE 6 SESSÕES

♀ Mulher
🕒 30 Anos



OBJETIVO

Reduzir a retenção de líquidos e melhorar a qualidade da pele.



PROGRAMAS



NECK FACE
DRAIN



NECK FACE
ONE



NECK FACE
TWO



PRESCRIÇÃO DO TRATAMENTO



FASTEST
RESULT

- Número de sessões: 6
- Duração da sessão: 40 Minutos
- Frequência: 2x por semana

RESULTADOS DEPOIS DE 6 SESSÕES

- Melhoria dos contornos faciais



ANTES



DEPOIS DE 10 SESSÕES

♀ Mulher
🕒 35 Anos

OBJETIVO

Reduzir a visibilidade da cicatriz da cesariana e a fibrose e melhorar o aspeto da pele.

PROGRAMAS



SKINNEW



SKINREPAIR



FINAL

PRESCRIÇÃO DO TRATAMENTO



BEST RESULT

- Número de sessões: 10
- Duração da sessão: 20 Minutos
- Frequência: 2x por semana

RESULTADOS DEPOIS DE 6 SESSÕES

- Redução da fibrose
- Melhoria da flexibilidade da pele



ANTES

♀ Mulher
🕒 27 Anos

OBJETIVO

Reabilitar a cicatriz depois de uma cesariana, melhorar a pele.

PROGRAMAS



NOVASKIN



SKINREPAIR

DEPOIS DE 7 SESSÕES

PRESCRIÇÃO DO TRATAMENTO

- Número de sessões: 7
- Duração da sessão: 10 Minutos
- Frequência: 3x por semana

RESULTADOS DEPOIS DE 7 SESSÕES

- Redução da fibrose e da dor
- Redução da inflamação
- Melhoria do aspeto e elasticidade da pele



ANTES

♀ Mulher
🕒 22 Anos

OBJETIVO

Reabilitar a cicatriz depois de uma cesariana, melhorar o aspeto da pele e acelerar o processo de cicatrização das feridas.

PROGRAMAS



NOVASKIN



SKINREPAIR

DEPOIS DE 7 SESSÕES

PRESCRIÇÃO DO TRATAMENTO

- Número de sessões: 7
- Duração da sessão: 10 Minutos
- Frequência: 3x por semana

RESULTADOS DEPOIS DE 7 SESSÕES

- Redução da fibrose
- Melhoria do aspeto da pele



ANTES



DEPOIS DE 6 SESSÕES

♀ Mulher
🕒 26 Anos

OBJETIVO

Reabilitar depois de uma lipoaspiração, reduzir os edemas, melhorar o aspeto dos hematomas.

PROGRAMAS



SKINEW



LINFA

PRESCRIÇÃO DO TRATAMENTO

- Número de sessões: 6
- Duração da sessão: 30 Minutos
- Frequência: 1x por semana

RESULTADOS DEPOIS DE 6 SESSÕES

- Redução dos hematomas
- Melhoria do aspeto da fibrose



ANTES



DEPOIS DE 6 SESSÕES

OBJETIVO

Reabilitar depois de uma lipoaspiração, reduzir os edemas, melhorar o aspeto dos hematomas.

PRESCRIÇÃO DO TRATAMENTO

- Número de sessões: 6
- Duração da sessão: 30 Minutos
- Frequência: 1x por semana

PROGRAMAS



SKINEW



LINFA

RESULTADOS DEPOIS DE 6 SESSÕES

- Melhoria do aspeto dos edemas e dos hematomas



ANTES



DEPOIS DE 10 SESSÕES

♀ Mulher
🕒 40 Anos



OBJETIVO

Reduzir a fibrose e os edemas.



PROGRAMAS



SKINNEW



LINFA



STIMFLUID



PRESCRIÇÃO DO TRATAMENTO



- Número de sessões: 10
- Duração da sessão: 40 Minutos
- Frequência: 2x por semana

RESULTADOS DEPOIS DE 10 SESSÕES

- Melhoria da qualidade da pele
- Redução do volume nas pernas



ANTES



DEPOIS DE 6 SESSÕES

♀ Mulher
🕒 40 Anos



OBJETIVO

Reabilitar depois de uma mamoplastia, reduzir os edemas, melhorar o aspeto dos hematomas.

PROGRAMAS



NOVASKIN



SKINREPAIR



PRESCRIÇÃO DO TRATAMENTO

- Número de sessões: 6
- Duração da sessão: 20 Minutos
- Frequência: 1x por semana

RESULTADOS DEPOIS DE 6 SESSÕES

- Redução da fibrose e dos edemas



ANTES



DEPOIS DE 10 SESSÕES

♂ Homem

🕒 65 Anos



OBJETIVO

Reabilitar depois de uma artroplastia, reduzir os edemas, melhorar o aspeto dos hematomas.

PROGRAMAS



NOVASKIN



SKINREPAIR



PRESCRIÇÃO DO TRATAMENTO

- Número de sessões: 10
- Duração da sessão: 30 Minutos
- Frequência: Todos os dias

RESULTADOS DEPOIS DE 10 SESSÕES

- Redução da fibrose, edemas e hematomas
- Melhoria da flexibilidade e mobilidade do paciente



ANTES



DEPOIS DE 10 SESSÕES

OBJETIVO

Reabilitar depois de uma artroplastia, reduzir os edemas, melhorar o aspeto dos hematomas.

PRESCRIÇÃO DO TRATAMENTO

- Número de sessões: 10
- Duração da sessão: 30 Minutos
- Frequência: Todos os dias

PROGRAMAS



NOVASKIN



SKINREPAIR

RESULTADOS DEPOIS DE 10 SESSÕES

- Redução da fibrose, edemas e hematomas
- Melhoria da condição da perna



ANTES



DEPOIS DE 5 SESSÕES

♀ Mulher
🕒 53 Anos



OBJETIVO

Recuperar depois de uma rinoplastia, reduzir os hematomas e edemas.

PROGRAMAS



NOVASKIN



SKINREPAIR



PRESCRIÇÃO DO TRATAMENTO

- Número de sessões: 5
- Duração da sessão: 20 Minutos
- Frequência: 1x por semana

RESULTADOS DEPOIS DE 5 SESSÕES

- Redução visível dos hematomas causados pela cirurgia e melhoria dos contornos faciais.



ANTES



DEPOIS DE 5 SESSÕES



OBJETIVO

Recuperar depois de uma rinoplastia, reduzir os hematomas e edemas.

PROGRAMAS



NOVASKIN



SKINREPAIR



PRESCRIÇÃO DO TRATAMENTO

- Número de sessões: 5
- Duração da sessão: 20 Minutos
- Frequência: 1x por semana




RESULTADOS DEPOIS DE 5 SESSÕES

- Redução visível dos hematomas causados pela cirurgia e melhoria da compactidade da pele



ANTES

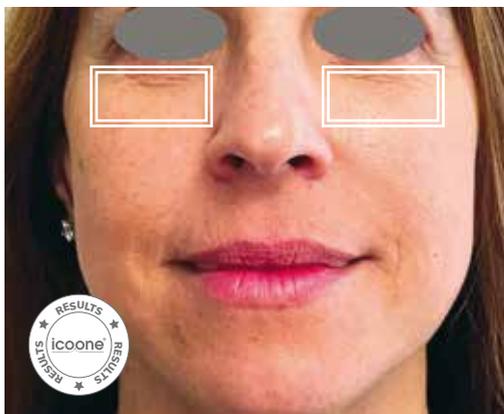

DEPOIS DE 5 SESSÕES

♀ Mulher
🕒 48 Anos

OBJETIVO

Recuperar depois de uma blefaroplastia, reduzir os hematomas.

PROGRAMAS



NOVASKIN



SKINREPAIR

PRESCRIÇÃO DO TRATAMENTO

- Número de sessões: 5
- Duração da sessão: 15 Minutos
- Frequência: 1x por semana

RESULTADOS DEPOIS DE 5 SESSÕES

- Melhoria do aspeto da pele
- Redução visível dos hematomas causados pela cirurgia



ANTES



DEPOIS DE 5 SESSÕES

♀ Mulher
🕒 50 Anos



OBJETIVO

Recuperar depois de uma blefaroplastia, reduzir os hematomas.

PROGRAMAS



NOVASKIN



SKINREPAIR



PRESCRIÇÃO DO TRATAMENTO

- Número de sessões: 5
- Duração da sessão: 15 Minutos
- Frequência: 1x por semana

RESULTADOS DEPOIS DE 5 SESSÕES

- Melhoria do aspeto da pele
- Melhoria da circulação nas áreas em redor dos olhos

IMAGENS COM INDICAÇÕES DE RESULTADOS ICOONE

De modo a tornar os resultados significativos e mostrar ao/a cliente/paciente, é importante tirar fotos do antes e depois de elevada qualidade. Aqui encontra algumas indicações uteis para ajudar neste processo:

Antes de começar os tratamentos, certifique-se que o/a seu/sua cliente/paciente assina o formulário de consentimento para divulgação das imagens,

De modo a tirar fotografias de boa qualidade, precisa dos seguintes itens:

- O roll-up de medições icoone para usar como fundo
- O autocolante com o desenho de uns pés para colocar no piso em frente ao roll-up
- Um tripé (que deve ser colocado à altura do umbigo do/a cliente/paciente para resultados de CORPO e à altura do rosto para resultados de ROSTO)
- Uma máquina fotográfica de alta resolução

As fotografias devem ser tiradas de acordo com os seguintes padrões:



- As fotografias devem representar o progresso dos resultados, por isso devem ser tiradas antes de começar a primeira sessão, a meio do tratamento e no final de todas as sessões.
- Nas fotografias das diferentes fases, certifique-se que a cliente/paciente se coloca sempre na mesma posição (frente, lado ou costas) e que a distância entre o cliente/paciente e a máquina é sempre a mesma.
- O/a cliente/paciente deve estar despido/a, usando apenas as cuecas incluídas no pack do bodysuit.
- Tire cada foto duas vezes para o caso da primeira foto não ser suficientemente boa para usar.
- Tenha atenção à iluminação, é melhor não ter quaisquer sombras que possam escurecer a silhueta.
- Anote a definição de zoom usada quando tirar as primeiras fotos de modo a reproduzir a mesma nas fotos seguintes. A definição de zoom deve ser sempre a mesma em todas as fotografias.
- O/a cliente/paciente não deve ter nenhum creme ou óleos ou maquilhagem no corpo ou rosto.

Especificamente, no que diz respeito a resultados de CORPO:

As fotografias devem mostrar o corpo todo exceto a cabeça (para resultados de rosto, consultar as instruções relevantes) nas seguintes posições:

- Frente
- Costas
- Perfil direito
- Perfil esquerdo
- Faça zoom das partes do corpo onde o tratamento se vai focar

Recomendamos que os/as clientes/pacientes se coloquem na posição correta: braços esticados para formar um ângulo de 90° com o corpo (não colocar perto das pernas) e as mãos a tocar nos ombros.

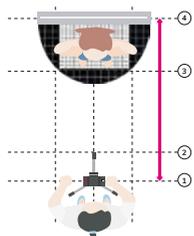
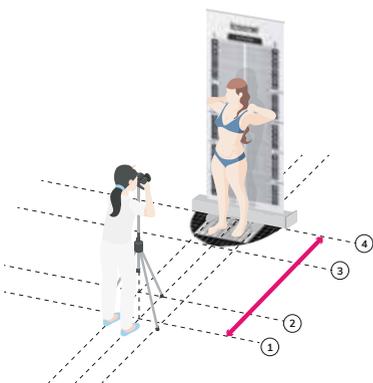


No que diz respeito a resultados de ROSTO:

O/a cliente/paciente deve sentar-se, fechar os olhos e posicionar a cabeça num apoio de cabeça. Se não tiver um apoio de cabeça: peça ao/a cliente/paciente para se sentar e garanta que este/a mantém uma posição vertical, apoiando a cabeça no encosto e alinhando a cabeça com a máquina (siga estas instruções também para tirar fotografias do pescoço).

As fotografias devem mostrar o rosto todo nas seguintes posições:

- Frente
- Perfil direito
- Perfil esquerdo
- Ampliação das partes relevantes do rosto

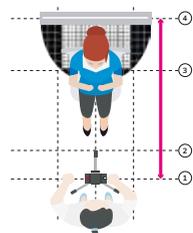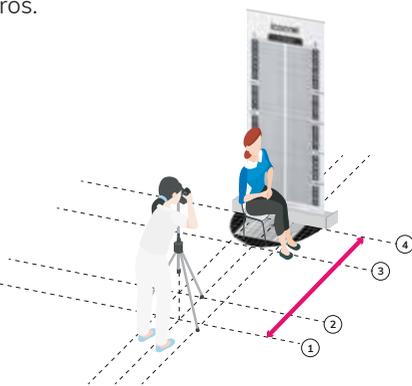

i-Tech[®]
INDUSTRIES
The Science of Skin

 **SORISA[®]**
O Especialista em saúde, beleza e bem-estar
Desde 1980
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO
EM PORTUGAL

Serviços Centrais
Parque Oriente - Rua Dom Nuno Álvares
Pereira, Armazém B3
2695-167 Bobadela - Portugal
T. (351) 210 334 300
icoone@sorisa.pt • www.sorisa.pt

Assistência técnica e logística
T. (351) 210 334 322 • spv@sorisa.pt

www.sorisa.pt

